

Programador Sphera Pro



SOBRE:

O dispositivo de programação proporciona facilidade no ajuste da pressão, fácil localização da válvula, confirmação imediata da pressão ajustada e não gera dor ao paciente.

O leitor possui um sistema de indicação de alinhamento que confirma a posição correta.



PASSOS DA PROGRAMAÇÃO

1- Defina se irá reduzir ou aumentar a pressão girando a parte superior até que o pino indicador esteja na posição “-” ou “+”.

2- Localizar a válvula. Alinhar a seta de indicação de fluxo do posicionador com o trajeto do cateter peritoneal. Movendo o posicionador ao redor da válvula, alinhar o centro do ponteiro com o centro do leitor. Ao girar o leitor no dois sentidos, o ponteiro deve permanecer parado. Realizar a leitura.

3- Manter o posicionador na mesma posição e inserir o programador no lugar do leitor. Girar no sentido anti-horário para aumentar a pressão e sentido horário para diminuir a pressão.

4- Trocar o programador pelo leitor. Realizar a leitura da nova pressão, mantendo sempre o centro do ponteiro alinhado com o centro do leitor.



CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS:

- Segurança contra a desprogramação: Rotor com duas travas mecânicas de segurança que se movem em sentidos opostos, permitindo travamento duplo ou individual.
- Dispositivo antigravitacional: Controla a hiperdrenagem automaticamente. Ajusta a pressão de abertura conforme a mudança postural do paciente. Possui 06 opções de resistência para atender às diferentes necessidades de controle de pressão de cada paciente.